



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% VOL.

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 110 ml (4054)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	2,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	20,5* 16 *16
Nb total de produit par palette	4032 unités
Poids total palette (hors palette)	336 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 30

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1 L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	•	•



Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le spray 110 ml sans gaz est un petit format adapté pour les kits de premiers secours, les trousseaux à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel médical itinérant. L'utilisation d'une compresse est indispensable pour ce produit.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine).
- Dispositif médical avec marquage CE
- Action immédiate



COMPOSITION : Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI : Pulvériser sur la zone à préparer, puis tamponner à l'aide d'une compresse. Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

PRÉCAUTIONS : DANGER: Contient : propane-2-ol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisés. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné. Date d'expiration: voir codage aérosol.